

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

A-CERUMEN spray

A-Cerumen est conseillé pour l'adulte et l'enfant à partir de 6 mois en usage régulier en alternative des cotons tiges, pour faciliter l'élimination du cérumen, dissoudre les bouchons de cérumen et prévenir leur formation.

Composition

Tensio-actifs doux (sodium acylsarcosinate et sucrose ester), agent humectant, excipients q.s.p 100%.
Formule colorée d'origine naturelle et sans conservateur.

Présentation

Spray de 40mL.

Posologie

- Pour l'hygiène régulière des oreilles : 2 fois par semaine.
- En présence de bouchons de cérumen : 3 à 4 jours de suite, matin et soir.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de perforation du tympan, d'otite et chez les porteurs d'aérateur transtympanique.

Mode d'emploi

- 1- Pencher la tête du côté opposé de l'oreille à traiter.
- 2- Effectuer deux pulvérisations dans l'oreille.
- 3- Laisser en contact environ 1 minute en massant la base de l'oreille.
- 4- Pencher la tête pour laisser s'écouler le produit et les résidus de cérumen.
- 5- Rincer avec du cérumen physiologique ou de l'eau claire, et essuyer l'excédent.

Précautions d'emploi

A rincer. Ne pas introduire trop profondément l'embout du spray dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter. Après chaque utilisation, retirer l'embout et le laver à l'eau chaude.

Mise en garde

Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux. En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin. Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert – site internet : www.labogilbert.fr et/ou à l'Autorité Compétente nationale.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Condition de conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui. Flacon à utiliser dans les 3 mois après

ouverture. Ne pas réfrigérer. Conserver à une température entre 10°C et 40°C.



Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle - F-14200 Herouville Saint-Clair



Distribué en France par : Laboratoires Grimberg, ZA des Brouties, rue Vermont - F- 78704
Conflans Saint-Honorine