

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### A-CERUMEN unidose

**A-Cerumen** est conseillé pour l'adulte et l'enfant à partir de 6 mois en usage régulier en alternative des cotons tiges, pour faciliter l'élimination du cérumen, dissoudre les bouchons de cérumen et prévenir leur formation.

### Composition

Tensio-actifs doux (sodium acylsarcosinate et sucrose ester), agent humectant, excipients q.s.p 100%. Formule colorée d'origine naturelle et sans conservateur.

### Présentation

Étui de 10 unidoses de 2mL.

Le conditionnement en unidoses permet facilité et sécurité d'emploi.

### Posologie

- Pour l'hygiène régulière des oreilles : 2 fois par semaine.
- En présence de bouchons de cérumen : 3 à 4 jours de suite, matin et soir.

### Mode d'emploi

- 1- Pencher la tête du côté opposé de l'oreille à traiter.
- 2- Instiller la moitié du contenu d'une unidose dans l'oreille.
- 3- Laisser en contact environ 1 minute en massant la base de l'oreille.
- 4- Pencher la tête pour laisser s'écouler le produit et les résidus de cérumen.
- 5- Rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau claire, et essuyer l'excédent.
- 6- Instiller l'autre moitié du contenu de l'unidose dans la seconde oreille si nécessaire, et répéter les étapes 3, 4 et 5.

### Précautions d'emploi

A rincer. Ne pas introduire trop profondément l'embout de l'unidose dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter. Éviter le contact avec les yeux.

### Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de perforation du tympan, d'otite et chez les porteurs d'aérateur transtympanique.

### Mises en garde

- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne.
- En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin.
- Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin.
- Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert
- site internet : [www.labogilbert.fr](http://www.labogilbert.fr) et/ ou à l'Autorité Compétente nationale.

**TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

### Conditions de conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui. Ne pas réfrigérer. Conserver à l'abri de la lumière. Conserver à une température comprise entre 10°C et 40°C.



Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle - F-14200 Herouville Saint-Clair



Distribué en France par : Laboratoires Grimberg, ZA des Brouties, rue Vermont - F- 78704  
Conflans Saint-Honorine